



nimue microneedling
nimue trans dermal solutions™




nimue
SKIN TECHNOLOGY

NIMUE-TDS™
ASCORBIC ACID 10%

nimue
SKIN TECHNOLOGY

NIMUE-TDS™
DMAE+SILOLIUM+LIPOIC ACID

Spezialanwendungen für jünger wirkende Haut

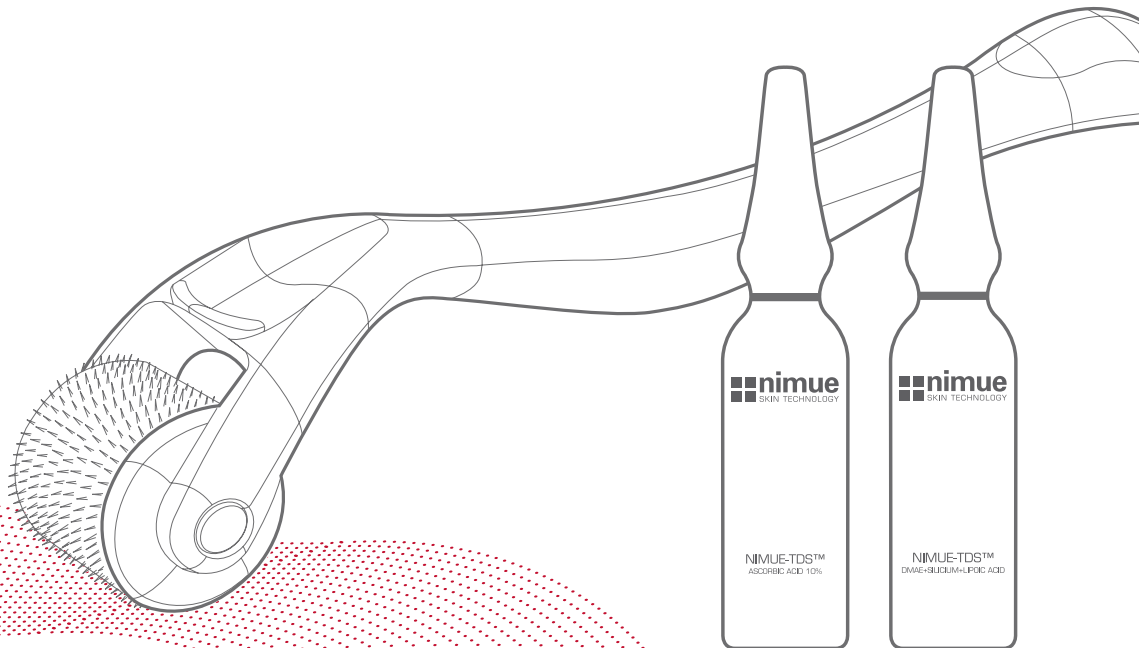

nimue microneedling

Diese spezielle Kabinenbehandlung für jünger wirkende Haut wurde zur sichtbaren und nachhaltigen Verbesserung und Erneuerung des Hautbildes entwickelt und wird nur von speziell geschulten und zertifizierten nimue-Experten ausgeführt.

Mit dem microneedling Roller wird auf minimal invasivem Wege die Kollagensynthese in der Haut angeregt. Intradermale Lösungen, die hochaktive Wirkstoffe enthalten, sind in der Lage, die bei der Behandlung entstehenden transdermalen Poren zu nutzen, um tief in die Haut einzudringen.

Das **nimue microneedling** in Synergie mit den **nimue Trans Dermal Solutions™** ist somit eine effektive, sichere und bezahlbare Methode, den Reaktivierungsprozess der Haut anzuregen.

nimue TDS™ Wirkstofflösungen

Die sterilen Lösungen in Glasampullen enthalten reine, aktive Komponenten, ohne Konservierungsstoffe.

Ascorbinsäure

Vitalisierung lichtgeschädigter Haut

- Wiederherstellung des Hautvolumens
- Reduzierung von Hyperpigmentierungen, aufhellend
- verbessert die Elastizität und schafft eine jugendlichere Ausstrahlung

DMAE, Alphaliponsäure und Silizium

Festigung lichtgeschädigter und gealterter Haut

- festigende und straffende Effekte für die Haut
- Reduzierung feiner Linien und Falten

Wie funktioniert microneedling?

Die feinen Nadeln des microneedling Rollers generieren für Bruchteile von Sekunden kleine Poren in die Haut, setzen einen Mikrodefekt in der Tiefe und regen so die Kollagensynthese an, da die Haut sofort beginnt, den Defekt zu reparieren. Dies führt zu sichtbarer Verringerung der Faltentiefe und zu verbesserter Oberflächentextur der Haut.

Die temporären Mikroporen verbessern das Eindringen aktiver Inhaltsstoffe aus den transdermalen Wirkstofflösungen, die während der Behandlung in die Haut einmassiert werden. Das Gewebe um die Poren und alle Schichten der Epidermis bleiben intakt und können somit neue Kollagenfasern bilden. Diese Behandlung ist daher ein effektives Einschleusungssystem welches zu jünger wirkender Haut führt.

Wie viele Behandlungen sind empfehlenswert und wann sind Resultate sichtbar?

Schon allein das microneedling für sich regt die Kollagenbildung an, die in ca. 6 Wochen sichtbar ist. In Synergie mit den transdermalen Wirkstofflösungen kann der Erneuerungsprozess der Haut beschleunigt und intensiviert werden, die Resultate sind somit früher zu sehen.

Schon allein das microneedling für sich regt die Kollagenbildung an, die in ca. 6 Wochen sichtbar wird. In Synergie mit den transdermalen Wirkstofflösungen kann der Erneuerungsprozess der Haut beschleunigt und intensiviert werden, die Resultate sind somit früher zu sehen.

Penetration aktiver Inhaltsstoffe unter Anwendung des microneedling Rollers



Der Erneuerungsprozess der Haut wird nach etwa 6-12 Monaten abgeschlossen sein. Zur Erhaltung und Verbesserung der Ergebnisse wird die tägliche Heimpflege empfohlen.

Folgebehandlungen stabilisieren und intensivieren das Hautbild und haben einen kumulativen Effekt wenn sie z.B. wöchentlich oder monatlich nach den empfohlenen Behandlungsempfehlungen erfolgen: Mindestens 6 microneedling Behandlungen werden empfohlen, um erwünschte Ergebnisse zu erreichen.

- im ersten Monat – 1 x wöchentlich (4 Behandlungen)
- im zweiten Monat – 1 x alle 14 Tage (2 Behandlungen)

Wie wirkt das microneedling?

- der Prozess der Kollageninduktion läuft natürlich ab
- sofort sichtbare Resultate
- das duale Behandlungssystem verstärkt die Produktwirkung
- kompakte Behandlung ohne Ausfallzeit oder Beeinträchtigung der Gesellschaftsfähigkeit
- die Haut wird nicht lichtempfindlich
- auch für dünne Haut geeignet

Welche Indikationen eignen sich besonders für diese Behandlung?

Die microneedling Behandlung eignet sich für eine große Bandbreite von Hautveränderungen, inklusive lichtgeschädigter Haut, feine Linien und Falten, unebene Hauttexturen, oberflächliche Aknenarben und zum Wiederaufbau von Volumen, Elastizität, Festigkeit und Spannkraft der Haut.

Wie läuft die Behandlung ab?

Die Haut sollte idealer Weise mindestens 2 Wochen mit den Produkten des nimue Heimpflegeprogramms behandelt worden sein, um Kollageninduktion und Erneuerung zu unterstützen. Eine längere Vorbereitungsphase liefert noch bessere Resultate. Die eigentliche Behandlung dauert 45 Minuten, mit Maske eine Stunde.

Wann sollte die Behandlung nicht durchgeführt werden?

Bei Hautkrebs, Warzen, erhabenen Malen, solaren Keratosen, Hautinfektionen, Rosacea, Exzemen, Psoriasis, Herpes und offenen Wunden sollte nicht behandelt werden. Ebenso bei aktiver Akne und während der Chemo-, Kortison- oder Strahlentherapie.

Lagerung und Sterilisation

- der microneedling Roller ist personengebunden und wird für keinen anderen Kunden verwendet
- für jeden Kunden wird ein neuer Roller aus der sterilen Verpackung entnommen
- der Roller wird nach 6 Anwendungen entsorgt
- der Roller wird nach dem nimue Sterilisationsprotokoll mit der nimue sterilising solution vor und nach jeder Behandlung sterilisiert und nach der Behandlung in der Aufbewahrungsbox, mit Namen des Kunden und Behandlungsdatum verstaut und in der Praxis aufbewahrt
- der Roller sollte nicht mit externen, kontaminierenden Substanzen in Berührung kommen, heruntergefallene Geräte können nicht mehr verwendet werden und müssen ersetzt werden

(wahllose Verwendung anderer Sterilisationslösungen kann den Roller beschädigen)

Behandlungsablauf

Vorbereitung

cleansing gel, conditioner, exfoliating enzyme, prepping solution

Aktivbehandlung

Der Roller wird mit gleichmäßig sanftem Druck horizontal und vertikal über die Behandlungszonen gerollt. Die nimue TDS™ Lösungen werden während der Behandlung in die Haut einmassiert.

Masken


collagen face film oder alginate mask

Nachbehandlung

moisturiser lite oder hyaluronic acid gel

Welche Ergebnisse können erwartet werden?

- Wiederherstellung des Hautvolumens
- Porenverfeinerung und Verbesserung der Hauttextur
- Verbesserung oberflächlicher Narben
- Glättung feiner Linien und Falten, Verbesserung der Elastizität

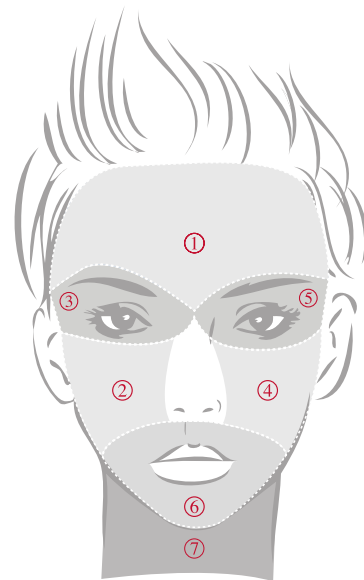

microneedling Behandlungsbereiche

Überzeugen Sie sich, dass Ihr nimue-Experte für diese Behandlung zertifiziert ist.

microneedling Ergebnisse

vorher und nachher

Kunde: weiblich

microneedling Behandlung mit nimue TDST[™] (Ascorbinsäure)



vorher



nach 2 Behandlungen



vorher



nach 2 Behandlungen

(Alle Aufnahmen in dieser Broschüre erfolgten unter professionellen Bedingungen und wurden nicht retuschiert.)



vorher



nach 2 Behandlungen



vorher



nach 2 Behandlungen

Beobachtungen: Verbesserung der Nasolabialfalten, allgemein gesündere Ausstrahlung

Australien Österreich Kanada Dänemark Deutschland Finnland
Irland Island Malaysia Namibia Niederlande Neuseeland Norwegen
Russland Seychellen Südafrika Schweden Schweiz
Vereinigte Arabische Emirate Großbritannien



Die aktiven Zutaten der nimue Produkte werden in
Deutschland, Frankreich, Spanien, den USA und der Schweiz entwickelt.

www.nimue-skin.de

nimue Deutschland

LaserPoint AG – Aspastr. 24 A – D-59394 Nordkirchen – info@nimue-skin.de

Telefon: +49 (0) 2596/9722-0 – Telefax: +49 (0) 2596/9722-22